

Bedienung

MediPad Kissensender



Warnung

Der MediPad Kissensender entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit versorgten Bewohner, sondern unterstützt Pflegepersonen dabei, Beobachtungszeiträume verlängern zu können. Das System ist regelmässig auf Funktion zu kontrollieren und bei Abweichungen von einem Fachmann zu überprüfen. Lassen Sie sich in die Bedienung und Funktionskontrolle von einer Fachperson einweisen.

Dieses funkbasierende System darf nicht zur Meldung bei vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen eingesetzt werden.

Funktionen und Bedienung

Der MediPad Pneumatik-Kissensender dient als Ruftaster für motorisch stark eingeschränkte Personen. Aufgrund seiner Grösse und Funktion ist es möglich, Rufe durch leichtes Berühren und flächigen Druck auszulösen. Der Ruf wird drahtlos an einen Funkempfänger übertragen, der diesen dann an eine Rufanlage oder Personen weiterleitet. Anm.: wie und wohin Rufweiterleitungen erfolgen, bestimmt das jeweilige Empfangsteil und die damit verbundenen Rufkomponenten. Die Funktionen und Maßnahmen sind deren Beschreibungen zu entnehmen.

Anlernen/Ablernen eines MediPad am zugeordneten Funkempfänger

Bevor das MediPad verwendet werden kann, ist es am zugehörigen Funkempfänger anzulernen.

Damit der Empfänger das MediPad erkennt, muss dieses mit seiner Melderennung „angelehrt“ werden. Der umgekehrte Vorgang ist durchzuführen, wenn das MediPad weggenommen oder an einen anderen Empfänger portiert wird. Die Vorgehensweisen dazu sind in den Unterlagen zum jeweiligen Empfangsteil beschrieben. Bitte beachten, dass das MediPad und der zugeordnete Empfänger die gleiche Frequenz haben müssen! Mögliche Frequenzen sind: 433 MHz und 869 MHz. Die Frequenzangaben stehen auf dem Typenschild des MediPad (nach Öffnen des rückseitigen Reissverschlusses sichtbar) und des zugehörigen Empfängers.

Sichere Reichweite der Funkverbindung prüfen


Die Funkreichweite des MediPad entspricht den Anforderungen der technischen Prüfstelle der Krankenkassen. Aufgrund dieser Spezifikation kann innerhalb von Gebäuden mit ca. 30 m Reichweite gerechnet werden. Allerdings hängt die Entfernung wesentlich von den örtlichen, baulichen Gegebenheiten ab, vor allem, wenn Zwischenwände die Funkwellen dämpfen können. Die Entfernung kann sich auch, bzw. zusätzlich verringern, wenn Funkstörer in der näheren Umgebung den Empfang beeinträchtigen.

Deshalb vor Verwendung des MediPad immer prüfen, ob sicherer Empfang gegeben ist. Im Regelfall ist dies der Fall, wenn ein Ruf auch noch in ca. 10 m Zusatzentfernung zum Empfänger (gegenüber dem normalen Verwendungsort) ausgelöst werden kann. Wenn sich zwischen dem Empfangsteil und dem Rufort Wände befinden, wird empfohlen, die Entfernungsprüfung regelmäßig (z.B. wöchentlich) zu wiederholen. Elektronische Geräte, welche als Störer wirken können sind zu entfernen. Wenn die Reichweite nicht sichergestellt ist, sollte auf die Verwendung verzichtet werden.

Auslösen von Rufen

Drücken auf das Kissen mit der Hand (s.Bild) oder Körperteilen löst einen Ruf aus. Sofern die akustische Meldung im MediPad aktiviert ist, wird die Rufauslösung dem Rufenden zusätzlich mittels Signalton gemeldet.

Bild: MediPad mit Ruf-Auslösungen durch Auflegen der Hand.

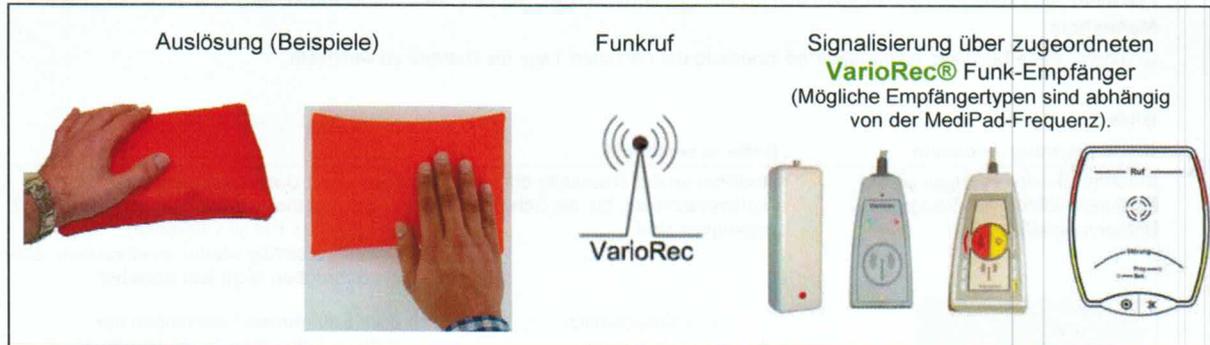

Einweisung der zu betreuenden Person

Die Person, welche mit dem MediPad Rufe auslösen soll, ist am MediPad einzuweisen, wie Rufe in Ihrer Situation ausgelöst werden können. Sofern ein MediPad auch mobil genutzt werden soll, ist die Person auch über die in Ihrer Umgebung möglichen Entfernungen einzuweisen.

Es ist darauf zu achten, dass Hitze, Feuer und Glut vom MediPad ferngehalten werden. Raucher sind bei der Benutzung des MediPad darauf hinzuweisen.

Reinigung/Zubehör

Das umhüllende Kissen lässt sich bei Beschädigung oder zur Reinigung abnehmen (siehe Seite 2). Ersatzkissen inkl. Klettbander können als Zubehörset bezogen werden. Die aktuelle Zubehör-Liste ist in der Homepage hinterlegt.